



2932-2, Chemin Milletta
Magog, Québec, J1X 0R4
Tél: 819-868-6742
800-361-8930
info@meditoile.com

GUIDE DES TAILLES ET DES POIDS

FIÈREMENT FABRIQUÉES À MAGOG

TAILLES APPROXIMATIVES POUR CHOISIR UNE TOILE DE LÈVE-PATIENT

PETIT	MOYEN
Largeur des épaules 12 -18 po C7 au coccyx 19 -23 po	Largeur des épaules 17 -20 po C7 au coccyx 21 - 25 po
GRAND	EXTRA -GRAND
Largeur des épaules 19 -22 po C7 au coccyx 23 -27 po	Largeur des épaules 21 -24 po C7 au coccyx 25 - 29 po

POIDS APPROXIMATIFS POUR CHOISIR UNE TOILE DE LÈVE-PATIENT

PETIT	MOYEN
30 - 55 kgs 65 - 120 lbs	50 - 75 kgs 110 - 165 lbs
GRAND	EXTRA -GRAND
70 - 110 kgs 155 - 240 lbs	105 - 150 kgs 231 - 330 lbs

- LE POIDS DEVIENT SECONDAIRE QUAND VOUS CONNAISSEZ LES MESURES DU BÉNÉFICIAIRE -

* Grandeur XXL: ajouter 2 po au tableau des tailles ci-dessus

** Toiles disponibles comme suit: XXL (420 lbs); 3XIL (510 lbs); 4XL (600 lbs); 5XL (690 lbs); 6XL (800 lbs); 7XL (980 lbs);

*** Pour une toile XPETIT, la largeur des épaules doit être de 10 - 16 po et la longueur de C7 au coccyx doit être de 17 - 21 po



CONVENTION DE PRISE DE MESURE POUR LES PATIENTS

UTILISATEURS DE TOILES LÈVE-PERSONNES


BUT : NORMALISER LA PRISE DE MESURE DES PATIENTS AFIN DE S'ASSURER DE LA SÉCURITÉ ET DU CONFORT DE CEUX-CI.

PRISE DE MESURE HABITUELLE :


POUR LES MODÈLES DE TOILES SUIVANTES : 3624 – 620 – 630 – 640 – 2000

- 1) D'UNE ÉPAULE À L'AUTRE (CÔTÉ TOMBANT DE L'ÉPAULE)
- 2) DE LA NUQUE (C7) AU COCCYX (CREUX)

DESSIN # 1 :

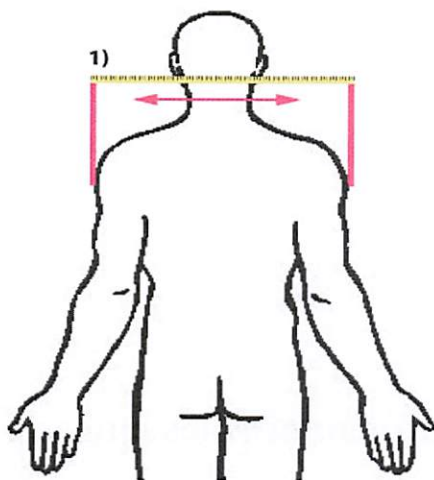

DESSIN # 2 :

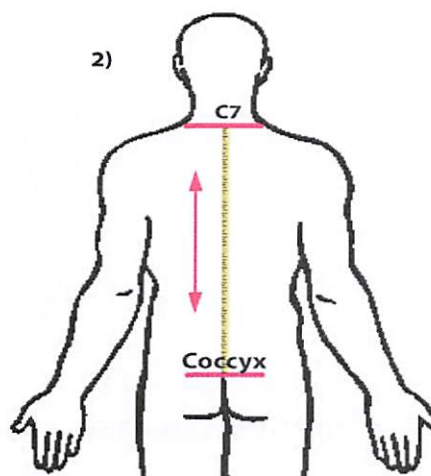

NB : TOUJOURS MESURER LA LARGEUR DES ÉPAULES OU LA LARGEUR DES HANCHES SOIT LE PLUS LARGE DES DEUX.

CUISSARDES : ON MESURE LES CUISSES SI LE PATIENT PÈSE 250 LIVRES OU PLUS OU SI LA PLUS GROSSE PARTIE DE SON POIDS SE SITUE AU NIVEAU DU BAS DU CORPS.

EXEMPLE : PATIENT DE 5,0 PIEDS QUI PÈSE 180 LBS,
DANS CE CAS, IL VAUT MIEUX MESURER LES CUISSES ET LES HANCHES.




PRISE DE MESURE NON HABITUELLE :

POUR LES MODÈLES DE TOILES SUIVANTES : 470 – 610 – 690 – 3624 AT

MODÈLE 470 : PLACER LE RUBAN À MESURER 2 PO. SOUS L'ESSELLE ET AMENER LE RUBAN 5 PO. AU DESSUS DE LA POITRINE. (DESSIN # 3)

DESSIN # 3 :

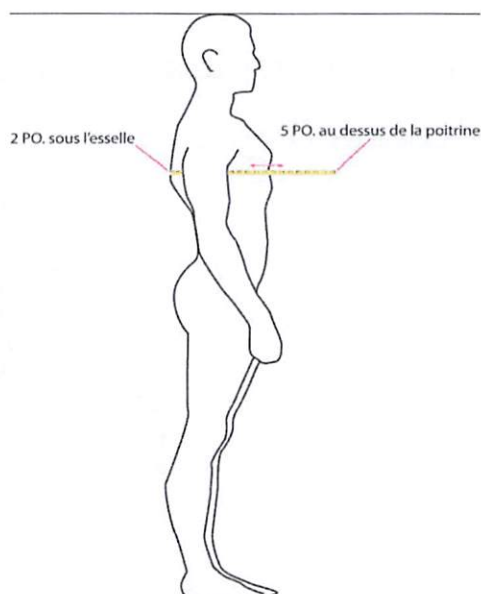

OU VÉRIFIER LE POIDS DU PATIENTS ET SE RÉFÉRER AU GUIDE DE POIDS SUIVANT :


PETIT	MOYEN
30 à 55 kg 65 à 120 lb	50 à 75 kg 110 à 165 lb
GRAND	EXTRA-GRAND
70 à 110 kg 155 à 240 lb	105 à 150 kg 231 à 330 lb

POUR UNE MEILLEURE ÉVALUATION, PRENEZ LA MESURE ET LE POIDS.




MODÈLE 610 :

1) MESURE HABITUELLE POUR LES ÉPAULES. (DESSIN # 1)

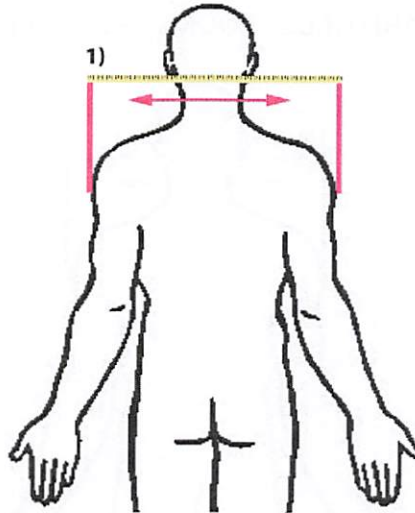

2) MESURER 2 POUCES PLUS HAUT QUE LE CREUX DU GENOUX JUSQU'À C7.
(DESSIN # 4)


DESSIN # 4 :

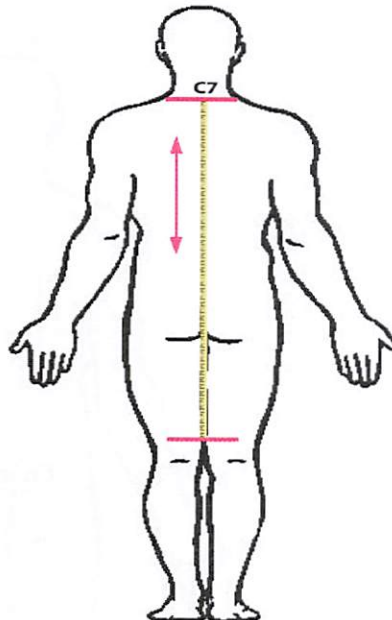



MODÈLE : 690 / 3624 AT

1) MESURE HABITUELLE POUR LES ÉPAULES. (DESSIN # 1)

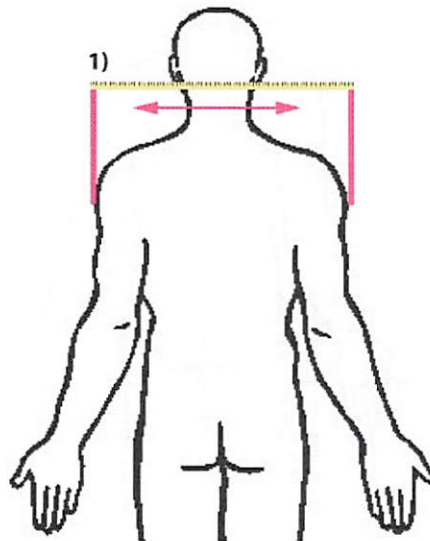

2) MESURER DU CREUX DU COCCYX À 1 PO. AU-DESSUS DE LA TÊTE. (DESSIN # 5)

DESSIN # 5

